



TEST DE 6 DROGAS FORMATO LÁPIZ

Dispositivo capaz de detectar hasta 6 drogas en una muestra de fluido oral, entregando resultados cualitativos en 5 minutos.

Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 6 a 72 horas.

(caja de 25 unidades)


Sustancia	Periodo de detección	Punto de corte*
Cannabis (THC)	5 a 10 mins hasta 14 horas	50 ng/mL
Cocaína (COC)	5 a 10 mins hasta 24 horas	20 ng/mL
Anfetaminas (AMP)	5 a 10 mins hasta 72 horas	50 ng/mL
Metanfetaminas (MET)	5 a 10 mins hasta 72 horas	50 ng/mL
Opiáceos (OPI)	7 hasta 21 horas	40 ng/mL
Benzodiacepinas (BZO)	5 horas hasta los 12 días	30 ng/mL

*Punto de corte basado en lo dictaminado por SAMHSA en EEUU.



FORMA DE USO DEL TEST


Step 1

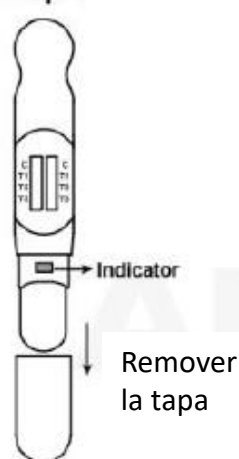



Step 2



Step 3

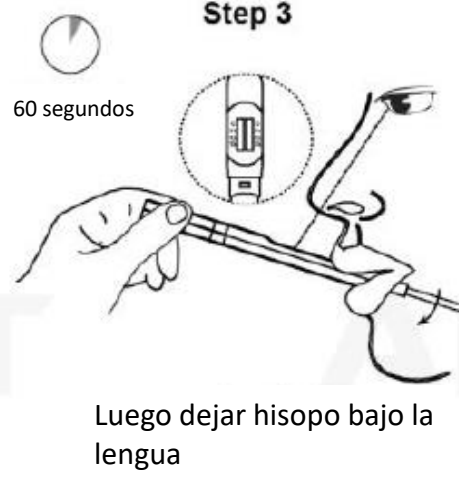

Step 4

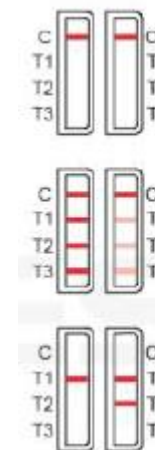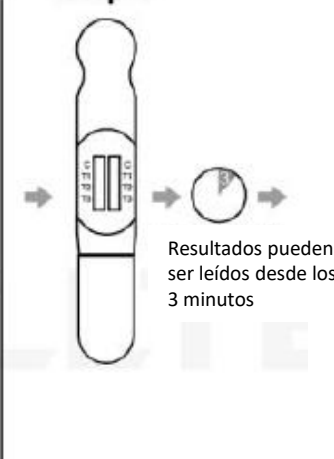

Positivo

Negativo

Inválido



TEST DE 5 DROGAS FORMATO LÁPIZ

Dispositivo capaz de detectar hasta 5 drogas en una muestra de fluido oral, entregando resultados cualitativos en 5 minutos.

Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 6 a 72 horas.

(caja de 25 unidades)


Sustancia	Periodo de detección	Punto de corte*
Cannabis (THC)	5 a 10 mins hasta 14 horas	50 ng/mL
Cocaína (COC)	5 a 10 mins hasta 24 horas	20 ng/mL
Anfetaminas (AMP)	5 a 10 mins hasta 72 horas	50 ng/mL
Opiáceos (OPI)	7 hasta 21 horas	40 ng/mL
Benzodiacepinas (BZO)	5 horas hasta los 12 días	30 ng/mL

*Punto de corte basado en lo dictaminado por SAMHSA en EEUU.



FORMA DE USO DEL TEST


Step 1

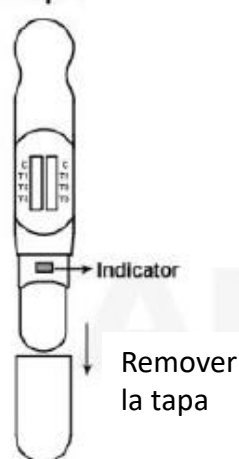



Step 2



Step 3

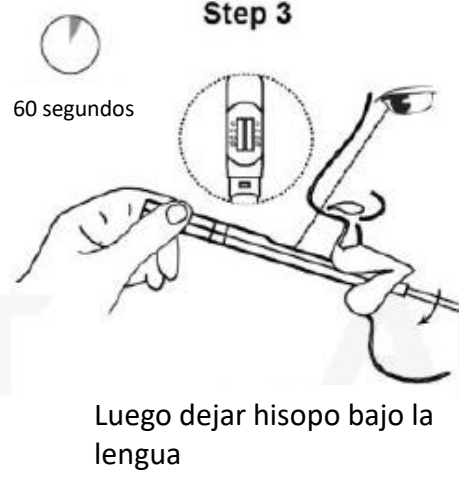

Step 4

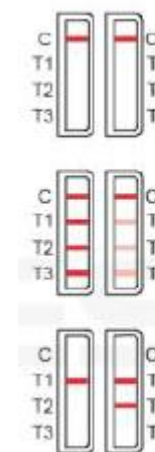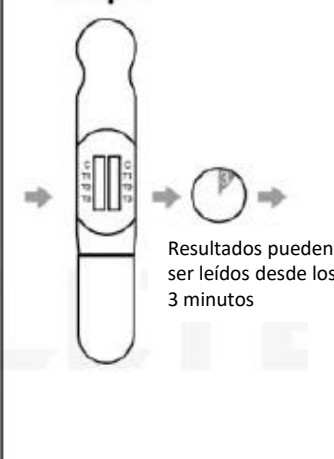

Positivo

Negativo

Inválido



TEST DE 5 DROGAS FORMATO ORINA PANEL

Dispositivo capaz de detectar hasta 5 drogas en una muestra de orina, entregando resultados cualitativos en 5 minutos.


Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 2 horas hasta los 7 días.
(caja de 25 unidades)



FORMA DE USO DEL TEST

Sustancia	Periodo de detección	Punto de corte*
Cannabis (THC)	2 horas hasta 7 días	50 ng/mL
Cocaína (COC)	3 horas hasta 4 días	150 ng/mL
Anfetaminas (AMP)	5 horas hasta 1 días	500 ng/mL
Opiáceos (OPI)	2 horas hasta 2 días	2000 ng/mL
Benzodiacepinas (BZO)	2 horas hasta 3 días	200 ng/mL

*Punto de corte basado en lo dictaminado por SAMHSA en EEUU.

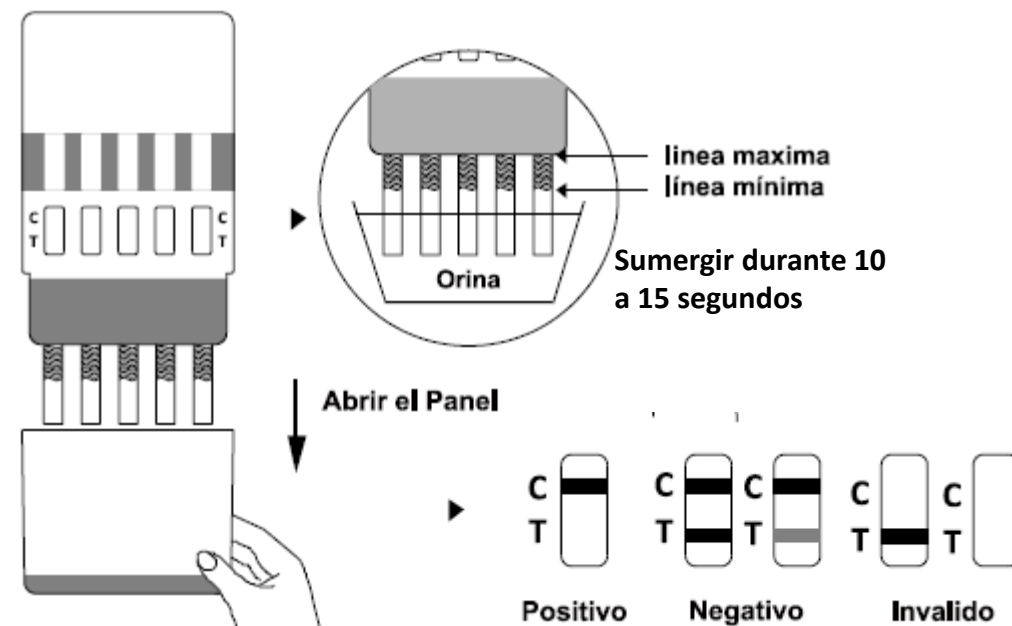

Leer resultados a los 5 minutos,
nunca después de los 10 minutos

TEST DE 6 DROGAS FORMATO COPA CON LLAVE DE ACTIVACIÓN



Dispositivo capaz de detectar hasta 5 drogas en una muestra de orina, entregando resultados cualitativos en 5 minutos.

Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 2 horas hasta los 7 días.


(caja de 25 unidades)

Sustancia	Periodo de detección	Punto de corte*
Cannabis (THC)	2 horas hasta 7 días	50 ng/mL
Cocaína (COC)	3 horas hasta 4 días	150 ng/mL
Anfetaminas (AMP)	5 horas hasta 1 días	500 ng/mL
Metanfetaminas (MET)	5 horas hasta 1 días	500 ng/mL
Opiáceos (OPI)	2 horas hasta 2 días	2000 ng/mL
Benzodiacepinas (BZO)	2 horas hasta 3 días	200 ng/mL

*Punto de corte basado en lo dictaminado por SAMHSA en EEUU.

FORMA DE USO DEL TEST

① Técnico sustituye y asegura el casquillo mientras que la copa esté sobre una superficie plana.

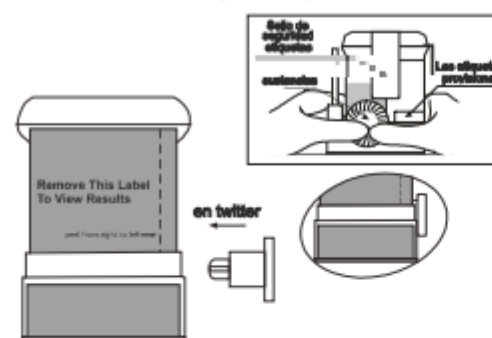


② Técnico despega la etiqueta para revelar tira(s) de la adulteración.



③ Espera cinco minutos leer los resultados de drogas.



④ Lea las tiras de adulteración y tiras de alcohol entre 3-5 minutos con la ayuda de la carta de color proporcionado aparte / en bolsa de aluminio.

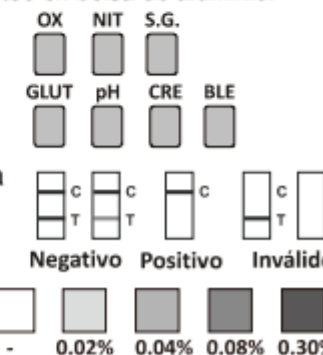

El resultado de la tira de droga debe leerse a los 5 minutos.

En 2 minutos a la hora de leer artículos de alcohol.



TEST DE 5 DROGAS FORMATO COPA SALIVA

Dispositivo capaz de detectar hasta 5 drogas en una muestra de fluido oral, entregando resultados cualitativos en 5 minutos sin necesidad de manipulación de la muestra.

Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 6 a 72 horas.



(caja de 20 unidades)

Sustancia	Periodo de detección	Punto de corte*
Cannabis (THC)	5 a 10 mins hasta 14 horas	50 ng/mL
Cocaína (COC)	5 a 10 mins hasta 24 horas	20 ng/mL
Anfetaminas (AMP)	5 a 10 mins hasta 72 horas	50 ng/mL
Opiáceos (OPI)	7 hasta 21 horas	40 ng/mL
Benzodiacepinas (BZO)	5 horas hasta los 12 días	30 ng/mL

*Punto de corte basado en lo dictaminado por SAMHSA en EEUU.



FORMA DE USO DEL TEST

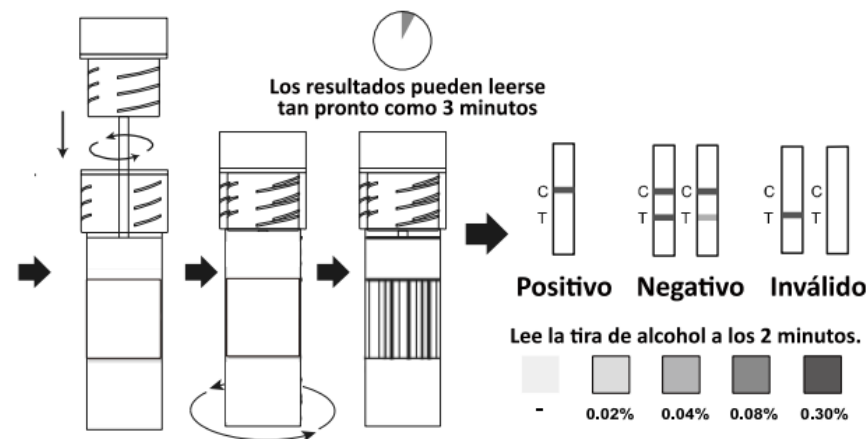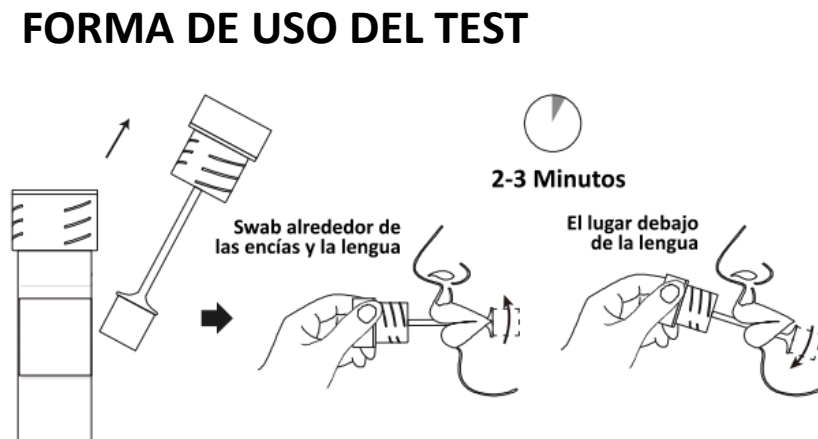

TEST DE ALCOHOL EN SALIVA DESECHABLE

Test reactivo a la presencia de alcohol en muestra de saliva, entregando resultados semi- cualitativo en 2 minutos, dando un porcentaje aproximado dependiendo del tinte de la tira reactiva, con un punto de corte de 0,02% BAC.
(caja de 50 unidades)



FORMA DE USO DEL TEST

